

**IVORY**  
愛得利

乐享

为便于您正确操作本产品，使用产品前请仔细阅读本使用说明书，并保留备用。




支持母乳喂养

# 使用说明书

## 电动吸奶器

### Electric Breast Pump

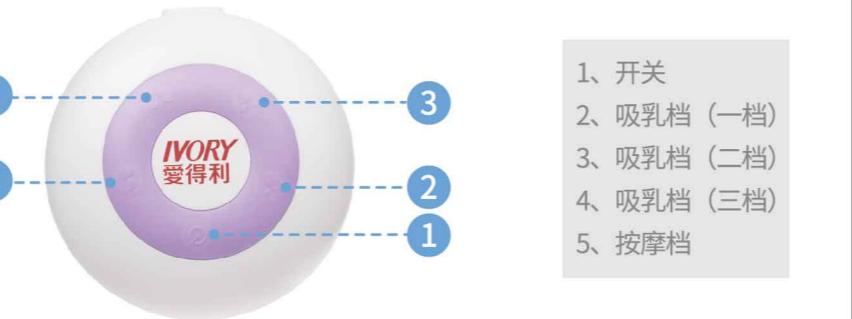

电源供电

充电宝供电

电池供电

电池供电注意事项：

\*请按照电池盒内正负极指示图，正确安装电池。\*采用碱性电池供电方式约可使用3小时左右。\*如采用电池供电方式，吸力大小将随电池剩余电力多少而逐渐减弱。\*如果您电池盒中插入电池并正确连接了电源适配器或充电宝，吸奶器仅使用电源或充电宝运行。\*若长时间不使用，请将电池取出。

电源供电注意事项：\*请勿随意更换电源适配器。

充电宝供电注意事项：\*请使用电源输出≤5V/2.1A的充电宝。\*请确保充电宝电力充足。(充电宝电力不足，将导致吸奶器无法正常使用即吸力不够)

清洗和消毒

- 主机、硅胶连接管、护盖、电源适配器不需要清洗消毒，因为它们不接触母乳。
- 首次使用之前，除主机、硅胶连接管、护盖、电源适配器外，请对所有吸奶器部件进行清洗和消毒。
- 每次使用完，请及时清洗这些部件。
- 吸奶器内含很多小零件，清洗时请注意不要丢失零部件。
- 清洗时请使用柔软的刷子。
- 清洗鸭嘴阀时不可用刷子等刷洗前端的阀门，否则容易造成闭合不紧产生漏气现象。(盒内附赠一个备用的鸭嘴阀)
- 清洗硅胶材质的零部件时，请勿太用力，否则有可能会造成破损或划伤。
- 将各部件清洗干净并放入水中煮沸消毒3-5分钟。煮沸消毒时水量应足够，避免产品因长时间接触到温度较高的锅底或锅沿而导致变形。

## 使用方法

- 吸奶前请将双手洗净。
- 吸奶器使用前,请先进行清洗、消毒。并按照正确顺序进行安装。
- 选择一个感觉舒适的姿势,开始吸乳。
- 将乳房、乳头聚拢向硅胶按摩垫中心,调整按摩垫使其舒适且紧密地贴合乳房,并避免空气从侧边漏出。
- 按开/关按钮,开启吸奶器按摩模式。(开/关按钮和按摩模式按钮将同时亮起)。按摩模式以柔和的吸力(频率快、力度小)按摩乳房,刺激乳腺,为吸乳做准备。



- 按摩约1-2分钟后,当您感觉乳汁开始要流出时,您可以选择吸乳模式吸乳。(模拟宝宝吸、停、放吸乳模式)。吸乳模式配有三档不同吸力。妈妈可根据哺乳阶段及奶量状况选择适合吸力,轻松吸出乳汁。您也可以随时按下相应的按钮返回较低吸力模式或关闭吸奶器电源。



- \*您无需使用所有吸力模式,仅使用令您感觉舒适的模式。
- \*过度使用和连续吸引,有可能会造成乳房的疼痛,请避免这样使用。
- \*乳房疼痛时,请中止吸奶,以防情况恶化。
- 一般情况下,您需要花费10分钟左右来吸出60-120毫升乳汁,但这因人而异。
- 完成吸奶后,关闭吸奶器电源,然后从乳房上小心地取下吸奶器主体。
- 将奶瓶从吸奶器主体上旋下来,装上所配奶嘴,即可喂养宝宝。

## 耐高温PESU瓶身/搭配超软液体硅胶奶嘴

- 瓶身采用德国进口医疗级安心材质PESU,不含双酚A。
- 耐高温180°C(可煮沸、蒸汽,亦可放入高温杀菌机及微波消毒)。
- 耐药品性佳,适用各种清洁剂,清洗方便。
- 耐冲击,不易摔碎,方便携带。
- 奶嘴严选超软液体硅胶精制而成,可灵活伸展,且具有母乳喂养实感,顺利完成母乳喂养与人工喂养的自然过渡。
- 螺旋设计,当乳汁经过时,有效减少乳汁中的气泡,预防宝宝胀气。
- 底部加宽加厚,仿效母乳胸型设计,不易吸扁,宝宝嘴巴更好地贴合奶嘴吮吸。



### 为了您孩子的安全与健康-警告!

- 不要将奶嘴置于阳光直射处、直接置于热源处或长期置于消毒剂中,这将导致奶嘴老化。
- 不应将奶嘴作为安抚奶嘴使用;
- 连续不断地长期吮吸奶嘴将会导致龋病;
- 喂食前应检查食物的温度。
- 奶瓶应在成人监护下使用。
- 每次使用之前,朝各个方向拉拔奶嘴进行检查。如有破损或缺陷应立即停止使用。
- 保持所有不使用的部件放在儿童可触及范围之外,使儿童不能接触,以免被儿童入口误吞、或发生其它危险的意外。不应将奶瓶及奶嘴任何部件作为玩具使用。

### 危险!

- 请使主机和电源适配器保持干燥。
- 切勿在洗澡或淋浴时使用吸奶器。
- 切勿将电动吸奶器防止或存储在浴盆或水池附近。
- 请勿触碰掉落在水中的产品。应立即从电源插座拔下插头。

## 警告!

- 请务必在使用后立即从电源插座拔下插头。
- 每次使用前先检查吸奶器(包括电源适配器)是否存在明显破损。如果电源适配器或插头损坏、无法正常工作、曾跌落或浸入水中,请勿使用吸奶器。
- 电源软线不能更换,如果软线损坏,次器具(电源适配器)应废弃。
- 吸奶器的主机内没有用户可维修部件。切勿尝试自行打开、维修或修理吸奶器。否则您的保修服务将失效。
- 将电源适配器和硅胶连接管远离高温表面。
- 仅使用产品上随附的电源适配器。
- 切勿将任何异物插入或塞入硅胶连接管中。

### 母乳储存

母乳含有丰富的营养成分,为保证母乳的新鲜,请按以下建议对母乳进行冷藏或冷冻。

### 保存建议

环境	条件	时间	储存用容器
冷藏室	≤5°C	24小时	母乳储存瓶、袋
冷藏室	≤-18°C	3个月	母乳储存袋

- \*请用温水(水温在40-50°C左右)加热冷藏的母乳。
- \*冷冻的母乳解冻时,应先用冷水冲洗储存袋,再逐渐加入温水,直至母乳完全解冻并升至适宜哺喂的温度。
- \*请勿使用沸水、微波炉等高温方式为母乳加热解冻。
- \*解冻好的母乳请及时给宝宝喂食,不可再次冷冻。
- \*请勿将刚吸出的母乳与保存的母乳混合在一起。

## 售后服务卡

感谢您选购本公司产品,为了您应有的权益敬请妥善保存售后服务卡。

姓名	电话
产品名称	产品型号
购买日期	
地址	

### 注意事项

- 自购买日期正常使用者,线路板、电机部件享有三年免费维修服务,整机享有一年免费维修服务。
- 保修设备在保修期内,在正常使用和维护的情况下,产品本身材料及工艺出现问题,发生故障,经查验属实,本公司提供免费修理及更换零件。
- 本公司保留对所有内容的修改权和解释权。

### 非保修范围

- 使用不慎或错误和人为导致的损坏。
- 售后服务卡遗失或损毁。
- 因自然灾害等不可抗拒力造成损坏的。

品名:乐享电动吸奶器 货号:AC-201  
额定电压:100-240V~  
额定频率:50/60Hz  
额定电流:0.2A  
执行标准:GB 4706.1 Q/XDET 002 Q/XDET 020  
生产日期:见标示 检验合格  
请置于阴凉干燥处贮存  
贮存期:常温下5年 产地:福建省厦门市  
厦门帝尔特企业有限公司 厦门市思明区湖滨北路金星路61-69号  
服务电话:400-693-1731